

TEMAER HOSPITALARIA S.A
P.I. EL CASCAJAL – C/ MIRLOS 7 NAVE A
28320 PINTO – MADRID (SPAIN)

CE 0161

TEMA MASK REF:200185

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 149: 2001 + A1: 2009 Dispositivos de protección respiratoria. Media máscara filtrante para proteger contra partículas. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad con el certificado nº 20/3225/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161

Recomendaciones de uso:

El EPI se fabrica en un material no tejido con:

Bandas de Ajuste: Elastano y Poliamida.

Clip nasal: Acero galvanizado y polipropileno

Filtro: Polipropileno hidrófobo. 5 capas Spunbond / Meltblown / Hot air cotton / Meltblown / Spunbond.

ADVERTENCIAS:

- Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes de usar)
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de fugas si el vello facial pasa por debajo del sello facial;
- Máscara no válida en condiciones de baja calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno);
- Máscara no válida en atmósferas explosivas
- este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas
- El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara.
- No utilizar zonas de riesgo de explosión.
- Este producto es desechable y solo debe usarse una vez. No reutilizar y por favor desechar responsablemente.
- Se recomienda reemplazar la máscara cada 8 horas.
- Si está deteriorada, no debe usarse Hay que cambiarla, aunque no se haya utilizado nunca.
- La mascarilla autofiltrante tiene una duración de uso limitada y una fecha de caducidad.
- Es inapropiado el uso de la mascarilla por diferentes usuarios.
- Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente.

Niveles obtenidos

VALOR OBTENIDO: FFP2

Máxima penetración del material del filtro:

Clasificación	95 l/min % Max.
FFP1	20
FFP2	6
FFP3	1

"NR", la media máscara del filtro de partículas no debe utilizarse para más de un turno de trabajo.

OBSTRUCCIÓN:

D: NO EVALUADO


Almacenamiento: Manténgase alejada de la exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos y protegida contra agentes agresivos.

Embalaje: cajas de 50 unidades en envase unitario

www.temaer.com: Declaración de conformidad

Advertencia: solo un uso. Tiempo máximo de utilización 8 horas.

La media máscara debe desecharse después de su uso.

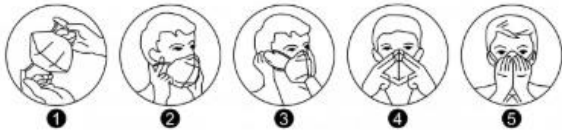

Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes de usar)

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Antes de colocar la mascarilla lavar las manos.
2. Desplegar la mascarilla y abrirla en su totalidad para poder colocarla entre la barbilla y la nariz.
3. Pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas.
4. Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la nariz (parte inferior) de forma que se asegure un buen ajuste y sellado. Moldear el clip con una sola mano puede resultar en un ajuste menos efectivo.
5. Realice la comprobación de ajuste cubriendo la mascarilla con las manos e inspirar profundamente. En caso de entrada de aire por los bordes, la mascarilla no está correctamente ajustada, por lo que se tiene que volver a realizar el proceso

APLICACIONES E INDICACIONES DE USO:

FFP2: Para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad. Uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos de soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como plomo, aluminio y manganeso. FPN:12(concentración permitida en el ambiente 12 veces el TLV).

Se recomienda reemplazar la máscara cada 8 horas.

- Si está deteriorada, no debe usarse Hay que cambiarla, aunque no se haya utilizado nunca.
- La mascarilla autofiltrante tiene una duración de uso limitada y una fecha de caducidad.
- Si el envase está deteriorado no usar.
- No toque la mascarilla cuando esté puesta, si lo hace lávese las manos con alcohol en gel o agua y jabón.
- Si observa dificultades al respirar quítese la mascarilla.
- No ponga la mascarilla a ninguna persona que tenga dificultad para respirar, esté inconsciente, o no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda.

EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS:



aaaa/mm
(vida útil)



<80%

Máxima humedad relativa del almacenamiento

+40°C



-20°C

Rango de temperatura del almacenamiento



Ver información suministrada por el fabricante

NR: No reutilizable

R: Reutilizable

D: Ensayo de obstrucción

Fabricado bajo Normas ISO 9001 ISO 13485